

Mode opératoire : Utilisation des gabarits de coupe macroscopique pour prélèvements de pièces opératoires.

Personnel concerné : Pathologistes, Equipe SAT Numérisation et SAT Macroscopie.

Matériel : Gabarit taille cassette standard ou mégacassette, scalpel, couteau.




Objectif :

Aider le personnel médical à normaliser la taille maximale des prélèvements standards ou « méga ». Cela s'applique aux trois axes du prélèvement : longueur, largeur et épaisseur.

Cette pratique :

- Optimise le traitement chimique durant la fixation, la déshydrations et la clarification.
- Améliore la qualité de l'inclusion par une vraie planéité du prélèvement donnant une surface coupée de qualité (complétude). Cela évite les recoupes, l'épuisement du bloc et les retards de numérisation. Le fait de forcer un prélèvement à rentrer dans un moule trop petit provoque des dégradations par écrasement.
- Permet de conserver la visibilité des limites de pièces encrées.
- Facilite le réglage d'un angle commun pour les différents blocs, sur le microtome, avec un gain de temps entre chaque changement de bloc et/ou lors des recoupes.
- Permet de centrer la coupe ce qui la place automatiquement Dans la zone numérisable.
- Améliore la qualité de l'étalement par le maintien **d'une bande de paraffine autour du prélèvement**. Cette marge permet au technicien de piquer pour étirer le ruban sur la zone sans prélèvement.
- Améliore la qualité et la durée de numérisation.

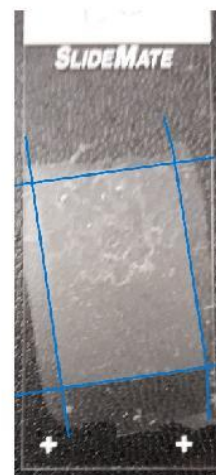

Rédacteur : M.Sisnaki
Approbateurs : S.Josse / P.Rouvier
Validation : I.Brocheriou-Spelle

Version : **28/07/2025**


M.O.N°2-SAT Numérisation /Lab.ACP PSL

Mode opératoire :


- Prétrancher le prélèvement selon les protocoles en vigueur.
- Appliquer le gabarit sur la surface à prélever, partie la plus longue vers le bas.




- Marquer ou trancher, avec un scalpel en position verticale, la zone délimitée par l'intérieur du gabarit.
- Oter le gabarit et compléter la découpe, en suivant les rainures réalisées, si l'épaisseur l'impose.

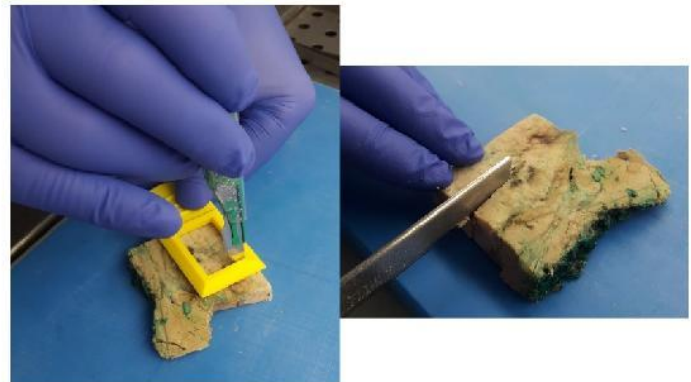

- Replacer le prélèvement rectangulaire dans le gabarit.

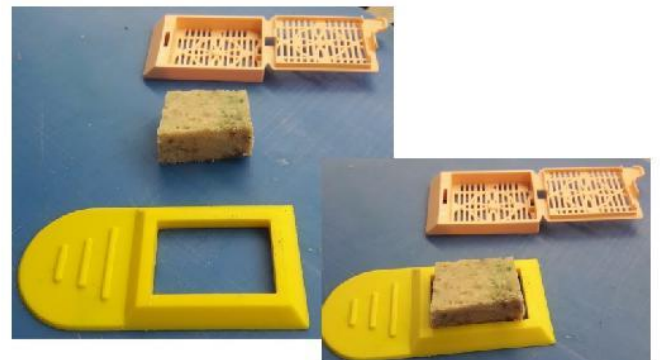

- Araser l'épaisseur avec le couteau posé sur le gabarit en maintenant le tout avec le pouce sur la languette et un bouchon (ou un élément protégeant vos doigts de l'outil tranchant) sur le prélèvement.

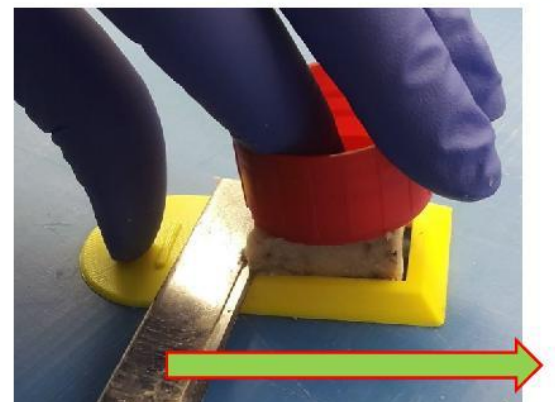

- **Le geste de découpe doit se faire dans le sens opposé à la main.**

- Placer dans la cassette et suivre le protocole de macroscopie en vigueur.



Fin de Mode opératoire

